

# Bima combi

Mjuk och komfortabel dyna för brukare som behöver extra stöd och tryckfördelning. Passar till brukare som har låg till medelhög risk för trycksår och som själv kan variera sittandet.



- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Komfortskum i sittgrop
- ✓ Urtag för sittbensknölar och svanskota
- ✓ Höga lateralstöd
- ✓ Bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggrör
- ✓ Bottenform för hängmatte-/ plan sits
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

## Konstruktion

Bima combi har en formad sittgrop med urtag för sittbensknölar och svanskota. Tillsammans med fastare polyeter under låren och ett speciellt formgjutet kallskum i sittgropen fördelar dynan tryck över sittytan.

Lateralstöden och den tydliga bendelaren ger ett bra stöd. Det mjuka sittskiktet ger extra hög komfort. Konstruktionen är lätt, 45x40cm väger endast 1,0 kg.

Bima combi finns att beställa för rullstolar med hängmattesits eller för rullstolar med plan sits.

## Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour.

Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget har en undersida av antihalkmaterial för bästa fixering i alla typer av rullstolar.

## Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget i luftig laminerad velour finns ett inkontinensskyddat överdrag i 3D-textil. För att beställa Bima combi med det alternativa överdraget ange art.nr-**3D** (24-4545-P-**3D**). Vid beställning av enbart överdrag ange **Ö**-art-nr-**3D** (**Ö**24-4545-P-**3D**)

## Tillbehör

Inkontinens-/skyddsöverdrag finns som tillbehör. För att förenkla vid tvätt är skyddsöverdraget utformat som en hätta med resår. För att beställa en inkontinenshätta ange **INKO** framför artikelnumret T.ex. **INKO**24-4545-P)

## Anpassningar

Bima combi kan anpassas direkt i fabrik. Enligt beskrivning/ skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

Bima combi för hängmattesits. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	24-3535-K	24-3538-K	24-3540-K	24-3543-K					7	90
37,5	24-3735-K	24-3738-K	24-3740-K	24-3743-K	24-3745-K	24-3747-K	24-3750-K		7	100
40	24-4035-K	24-4038-K	24-4040-K	24-4043-K	24-4045-K	24-4047-K	24-4050-K		7	110
42,5		24-4238-K	24-4240-K	24-4243-K	24-4245-K	24-4247-K	24-4250-K		7	125
45		24-4538-K	24-4540-K	24-4543-K	24-4545-K	24-4547-K	24-4550-K		7	125
47,5		24-4738-K	24-4740-K	24-4743-K	24-4745-K	24-4747-K	24-4750-K		7	135
50		24-5038-K	24-5050-K	24-5043-K	24-5045-K	24-5047-K	24-5050-K		7	140
52,5			24-5240-K	24-5243-K	24-5345-K	24-5247-K	24-5250-K		8	150
55			24-5540-K	24-5543-K	24-5545-K	24-5547-K	24-5550-K	24-5555-K	8	150
57,5			24-5740-K	24-5743-K	24-5745-K	24-5747-K	24-5750-K	24-5755-K	8	150
60					24-6045-K	24-6047-K	24-6050-K	24-6055-K	8	150


Bima combi för plan sits. Artikelnummer, mått och max brukarvikt										
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup> där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten							Dynans höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	24-3535-P	24-3538-P	24-3540-P	24-3543-P					7	90
37,5	24-3735-P	24-3738-P	24-3740-P	24-3743-P	24-3745-P	24-3747-P	24-3750-P		7	100
40	24-4035-P	24-4038-P	24-4040-P	24-4043-P	24-4045-P	24-4047-P	24-4050-P		7	110
42,5		24-4238-P	24-4240-P	24-4243-P	24-4245-P	24-4247-P	24-4250-P		7	125
45		24-4538-P	24-4540-P	24-4543-P	24-4545-P	24-4547-P	24-4550-P		7	125
47,5		24-4738-P	24-4740-P	24-4743-P	24-4745-P	24-4747-P	24-4750-P		7	135
50		24-5038-P	24-5050-P	24-5043-P	24-5045-P	24-5047-P	24-5050-P		7	140
52,5			24-5240-P	24-5243-P	24-5345-P	24-5247-P	24-5250-P		8	150
55			24-5540-P	24-5543-P	24-5545-P	24-5547-P	24-5550-P	24-5555-P	8	150
57,5			24-5740-P	24-5743-P	24-5745-P	24-5747-P	24-5750-P	24-5755-P	8	150
60					24-6045-P	24-6047-P	24-6050-P	24-6055-P	8	150

## Fakta

Klassificering: Tryckfördelande ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt (LVFS) MD 93/42/EEG 

Märkning enligt Hjälpmedelsinstitutets föreskrift

Dynans vikt: Bima combi 45x40x7cm ca 1,0 kg

Material i dynbas: Polyuretan

Material i överdrag: Svart Trevira CS™ laminerad velour, alternativt 3mm inkontinens skyddad 3D textil, antiglid

Rekonditionering:

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel

Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

## Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange **Ö** framför artikelnumret T.ex. **Ö24-4545-P**

## Mindre storlekar

Storlekar anpassade för barn finns på separat produktblad.

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950, Fax 0340-41790

info@bimaplastteknik.se, www.bimaplastteknik.se



**BIMA PLASTTEKNIK AB**  
Dynor för rehabiliteringsvård