

Bima cubekick

Används av brukare som sitter stor del av dagen i allround- eller aktivrullstol och som sparkar sig fram med höger eller vänster ben. Dynan är anpassad för personer med ett paretiskt ben t.ex. efter en stroke. Högt lateralstöd förhindrar abducerade på den sida som är paretiskt. Bima cubekick är tryckavlastande och används när det finns risk för trycksår. Dynan fungerar även som en coxidyna i rullstol, efter höftledsoperation.



- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Direkt tryckavlastande
- ✓ Inga inställningar behövs
- ✓ Motverkar bäckentippning
- ✓ Högt lateralstöd
- ✓ Bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

Konstruktion

Dynan har en sittgrop och är uppbyggd på en hård polyetenbotten tillsammans med en kärna av fast polyeter.

Individuella kuber i sittgropen med olika densitet avlastar var för sig sittbensknölar och svanskota. Extra stöd som motverkar bäckentippning på sparkbenet är inbyggd i dynan. Den är även försedd med högt lateralstöd och bendelare för att ge extra stöd för det paretiska benet. Det mjuka sittskiktet ger hög komfort. Konstruktionen är lätt, 45x43x8,5cm plan väger endast 1,3 kg.

Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart stretchig velour.

Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning.

Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt.

Överdraget har en undersida av antihalkmaterial för bästa fixering i alla typer av rullstolar.

Tillbehör

Inkontinens-/skyddshätta finns som tillbehör. För att beställa en inkontinenshätta ange INKO framför artikelnumret t.ex. INKO42-4543-K-H.

Vid inkontinens måste ett skyddsöverdrag användas. Stommen skyddas och behövs normalt inte rengöras.

Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget i velour finns ett stretchigt inkontinens-skyddat överdrag.

För att beställa Bima cubekick med inkontinensskyddat överdrag ange art.nr-4 (42-4545-P-4). Vid beställning av enbart överdrag ange Ö-art-nr

T.ex. Ö42-4545-P-4.

Artikelnummer, mått och max brukarvikt

| Bima cubekick | | | Kupad undersida -K | | | | | | Plan undersida -P | | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----|-----------|---------------|-----|
| (cm) | Sitsdjup | Sd/ Sd ^{bot} | Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{bot} = Sitsdjup på mitten | | | | | | Båda lären -VH | | Höjd (cm) | Max vikt (kg) | |
| Bredd | 35/38 | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | 47/50 | 50/53 | 55/58 | Vä | Hö | | | |
| 35 | 42-3535-K | 42-3538-K | 42-3540-K | 42-3543-K | | | | | | -V | -H | 9,4 | 125 |
| 37,5 | 42-3735-K | 42-3738-K | 42-3740-K | 42-3743-K | 42-3745-K | 42-3747-K | 42-3750-K | | | -V | -H | 9,4 | 125 |
| 40 | 42-4035-K | 42-4038-K | 42-4040-K | 42-4043-K | 42-4045-K | 42-4047-K | 42-4050-K | | | -V | -H | 9,4 | 125 |
| 42,5 | | 42-4238-K | 42-4240-K | 42-4243-K | 42-4245-K | 42-4247-K | 42-4250-K | | | -V | -H | 9,4 | 135 |
| 45 | | 42-4538-K | 42-4540-K | 42-4543-K | 42-4545-K | 42-4547-K | 42-4550-K | | | -V | -H | 9,4 | 135 |
| 47,5 | | 42-4738-K | 42-4740-K | 42-4743-K | 42-4745-K | 42-4747-K | 42-4750-K | | | -V | -H | 9,4 | 135 |
| 50 | | 42-5038-K | 42-5040-K | 42-5043-K | 42-5045-K | 42-5047-K | 42-5050-K | | | -V | -H | 9,4 | 150 |
| 52,5 | | | 42-5240-K | 42-5243-K | 42-5245-K | 42-5247-K | 42-5250-K | | | -V | -H | 10,4 | 150 |
| 55 | | | 42-5540-K | 42-5543-K | 42-5545-K | 42-5547-K | 42-5550-K | 42-5555-K | | -V | -H | 10,4 | 150 |
| 57,5 | | | 42-5740-K | 42-5743-K | 42-5745-K | 42-5747-K | 42-5750-K | 42-5755-K | | -V | -H | 10,4 | 150 |
| 60 | | | | | 42-6045-K | 42-6047-K | 42-6050-K | 42-6055-K | | -V | -H | 10,4 | 150 |
| 35 | 42-3535-P | 42-3538-P | 42-3540-P | 42-3543-P | | | | | | -V | -H | 8,5 | 125 |
| 37,5 | 42-3735-P | 42-3738-P | 42-3740-P | 42-3743-P | 42-3745-P | 42-3747-P | 42-3750-P | | | -V | -H | 8,5 | 125 |
| 40 | 42-4035-P | 42-4038-P | 42-4040-P | 42-4043-P | 42-4045-P | 42-4047-P | 42-4050-P | | | -V | -H | 8,5 | 125 |
| 42,5 | | 42-4238-P | 42-4240-P | 42-4243-P | 42-4245-P | 42-4247-P | 42-4250-P | | | -V | -H | 8,5 | 135 |
| 45 | | 42-4538-P | 42-4540-P | 42-4543-P | 42-4545-P | 42-4547-P | 42-4550-P | | | -V | -H | 8,5 | 135 |
| 47,5 | | 42-4738-P | 42-4740-P | 42-4743-P | 42-4745-P | 42-4747-P | 42-4750-P | | | -V | -H | 8,5 | 135 |
| 50 | | 42-5038-P | 42-5040-P | 42-5043-P | 42-5045-P | 42-5047-P | 42-5050-P | | | -V | -H | 8,5 | 150 |
| 52,5 | | | 42-5240-P | 42-5243-P | 42-5245-P | 42-5247-P | 42-5250-P | | | -V | -H | 9,5 | 150 |
| 55 | | | 42-5540-P | 42-5543-P | 42-5545-P | 42-5547-P | 42-5550-P | 42-5555-P | | -V | -H | 9,5 | 150 |
| 57,5 | | | 42-5740-P | 42-5743-P | 42-5745-P | 42-5747-P | 42-5750-P | 42-5755-P | | -V | -H | 9,5 | 150 |
| 60 | | | | | 42-6045-P | 42-6047-P | 42-6050-P | 42-6055-P | | -V | -H | 9,5 | 150 |

Vänster lår-försänkning, 42-4543-K-**V** eller Höger lår-försänkning, 42-4543-K-**H**
Försänkning av båda lären, 42-4543-K-**VH**

Rekonditionering

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Fakta

Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod 043303

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Dynans vikt: Bima cubekick 45x43x8,5cm ca 1,3 kg

Material i dynbas: Polyuretan, polyeten

Material i överdrag: Svart stretchig velour, antiglid

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÅSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

info@bimaplastteknik.se

www.bimaplastteknik.se