

Bima cubetech

Komfortabel dyna för personer med öm och känslig hud som behöver extra stöd. Avsedd för brukare som är beroende av rullstol för sina förflyttningar och har svårt att variera sittandet. Bima cubetech är förebyggande mot sår. Den används även när det finns risk för trycksår.



- ✓ Komfortabel och form stabil
- ✓ Direkt tryckavlastande
- ✓ Inga inställningar behövs
- ✓ Höga lateralstöd
- ✓ Bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för rygg rör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Flera storlekar
- ✓ Anpassningsmöjligheter

Konstruktion

Dynan har en sittgrop och är uppbyggd på en hård polyetenbotten tillsammans med en kärna av fast polyeter.

Individuella kuber i sittgropen med olika densitet avlastar var för sig sittbensknölar och svanskota. Den är även försedd med höga lateralstöd och utpräglad bendelare för att ge extra stöd. Det mjuka sittskiktet ger hög komfort. Konstruktionen är lätt, 42,5x43cm kupad väger endast 1,1 kg.

Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart stretchig velour.

Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning.

Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt. Överdraget har en undersida av antihalkmaterial för bästa fixering i alla typer av rullstolar.

Tillbehör

Inkontinens-/skyddshätta finns som tillbehör.

För att beställa en inkontinenshätta ange **INKO** framför artikelnumret T.ex. INKO40-4545-K.


Alternativa överdrag

Förutom standard överdraget i velour finns ett stretchigt inkontinens-skyddat överdrag.

För att beställa Bima cubetech med inkontinensskyddat överdrag ange art.nr-4 (40-4545-P-4). Vid beställning av enbart överdrag ange Ö-art-nr T.ex. Ö40-4545-P-4.

Långa urtag

För att dynan ska passa i Invacares rullstolar finns en variant av Bima allround med långa urtag (12x2cm) i dynans sido-/ bakkant.

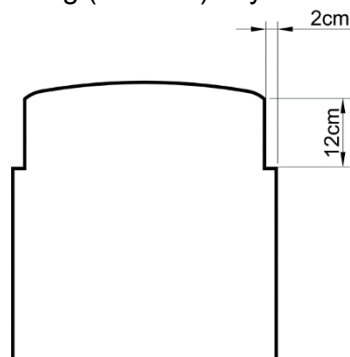

För att beställa denna variant ange prefix **44-** istället för 40- i artikelnumret. T.ex. 44-4545-P

Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima cubetech			Kupad undersida -K				Plan undersida -P			Höjd (cm)	Max vikt (kg)
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot}	Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten								
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58			
35	40-3535-K	40-3538-K	40-3540-K	40-3543-K					9,4	125	
37,5	40-3735-K	40-3738-K	40-3740-K	40-3743-K	40-3745-K	40-3747-K	40-3750-K		9,4	125	
40	40-4035-K	40-4038-K	40-4040-K	40-4043-K	40-4045-K	40-4047-K	40-4050-K	40-4055-K	9,4	125	
42,5		40-4238-K	40-4240-K	40-4243-K	40-4245-K	40-4247-K	40-4250-K	40-4255-K	9,4	135	
45		40-4538-K	40-4540-K	40-4543-K	40-4545-K	40-4547-K	40-4550-K	40-4555-K	9,4	135	
47,5		40-4738-K	40-4740-K	40-4743-K	40-4745-K	40-4747-K	40-4750-K	40-4755-K	9,4	135	
50		40-5038-K	40-5040-K	40-5043-K	40-5045-K	40-5047-K	40-5050-K	40-5055-K	9,4	150	
52,5			40-5240-K	40-5243-K	40-5245-K	40-5247-K	40-5250-K	40-5255-K	10,4	150	
55			40-5540-K	40-5543-K	40-5545-K	40-5547-K	40-5550-K	40-5555-K	10,4	150	
57,5			40-5740-K	40-5743-K	40-5745-K	40-5747-K	40-5750-K	40-5755-K	10,4	150	
60					40-6045-K	40-6047-K	40-6050-K	40-6055-K	10,4	150	
35	40-3535-P	40-3538-P	40-3540-P	40-3543-P					8,5	125	
37,5	40-3735-P	40-3738-P	40-3740-P	40-3743-P	40-3745-P	40-3747-P	40-3750-P		8,5	125	
40	40-4035-P	40-4038-P	40-4040-P	40-4043-P	40-4045-P	40-4047-P	40-4050-P	40-4055-P	8,5	125	
42,5		40-4238-P	40-4240-P	40-4243-P	40-4245-P	40-4247-P	40-4250-P	40-4255-P	8,5	135	
45		40-4538-P	40-4540-P	40-4543-P	40-4545-P	40-4547-P	40-4550-P	40-4555-P	8,5	135	
47,5		40-4738-P	40-4740-P	40-4743-P	40-4745-P	40-4747-P	40-4750-P	40-4755-P	8,5	135	
50		40-5038-P	40-5040-P	40-5043-P	40-5045-P	40-5047-P	40-5050-P	40-5055-P	8,5	150	
52,5			40-5240-P	40-5243-P	40-5245-P	40-5247-P	40-5250-P	40-5255-P	9,5	150	
55			40-5540-P	40-5543-P	40-5545-P	40-5547-P	40-5550-P	40-5555-P	9,5	150	
57,5			40-5740-P	40-5743-P	40-5745-P	40-5747-P	40-5750-P	40-5755-P	9,5	150	
60					40-6045-P	40-6047-P	40-6050-P	40-6055-P	9,5	150	

Rekonditionering

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvällösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel.

Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C, med avigsidan utåt och stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö framför artikelnumret T.ex. Ö40-4545-K

Mindre storlekar

Storlekar anpassade för barn finns på separat produktblad.

Anpassningar

Bima cubetech kan anpassas direkt i fabrik. Enligt beskrivning/ skiss kan vi anpassa mått, sitsvinkel och benlängdsskillnad.

Fakta

Klassificering: Tryckavlastande ISO-kod 043303

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Dynans vikt: Bima cubetech 42,5x43x8,5cm ca 1,2 kg

Material i dynbas: Polyuretan, polyeten

Material i överdrag: Svart stretchig velour, antiglid

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

info@bimaplastteknik.se
www.bimaplastteknik.se

