

Bima hålsits

Dyna med hål för avlastning av området runt svanskota, rektum och underliv. Brukaren kan besväras av hemorrojder, fraktur på svanskotan, bristning efter förlossning mm.

Tillverkas i två utföranden, lätt och standard.

1. Lätt har en mjukare dynbas som i de flesta fall passar för smärtekänsliga brukare.
2. Standard har en fastare dynbas. Passar de som vill sitta stadigt, med en mer tydlig avlastning.



Art.nr	Mått	Max brukarvikt
B312	Kil 39x36x8/2cm lätt	70kg
B312-2	39x36x7,5 lätt	90kg
B314	Kil 39x36x8/2cm std	125kg
B315	40x40x7,5cm lätt	125kg
B316	45x45x7,5cm lätt	140kg

Överdraget tillverkas av blå laminerad plysch för att ge komfort och luftighet.

Överdraget är monterat med motsatt fiberriktning för att förhindra framåtgångning.

Rekonditionering: Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning som förbehandlats med bakteriehämmande medel.

Dynbasen klarar även att ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Fakta

Klassificering: Dynor med direkt avlastning
ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

Vikt: 36x39x8/2cm lätt 0,6kg/ standard 0,8kg

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Material i dyna: lätt – fast polyeter/ standard – regenererad polyeter

Material i överdrag: Blå laminerad velour

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

info@bimaplastteknik.se

www.bimaplastteknik.se