



Bima hålfiberdyna



Målgrupp, kombinationer och prestanda

Mycket mjuk dyna avsedd för smärtekänsliga patienter. Är avsedd för användning i rullstolar och andra sittmöbler. Hålfiberdynan används både som sittdyna och som ryggdyna. Dynan kan också användas under ömma hälar och armbågar.



Dynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678

ISO-kod: 181006

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan uppfyller brandnorm ISO 7176–16.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.



Hantering



Avlägsna plastpåsen och notera att ena sidan är antiglidbehandlad och vattenavvisande. Denna sida kan med fördel vändas uppåt, då den är lätt att rengöra.

Önskas en mer luftig sittyta och en strävare yta mot underlaget, vänds den åt andra hållet.



Dynan kan vridas åt alla håll, men för att motverka framåtgång placeras dynan med kanalerna tvärs över sittytan. Enligt bild placeras kanalerna, 4st, åt motsatt håll som sittriktningen.



Tillbehör

Vid inkontinens används en universell skyddshätta som finns som tillbehör.



Rengöring och skötsel

Dynan tvättas i 60°C med 1/3 av normal tvättmedelsdos.

Hålfiberdynan ska torktumlas (låg värme) efter tvätt för att behålla sin form.

Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

Dynan förvaras i torrt, gärna i rumstempererat utrymme.

Kläm eller vik inte dynan.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år).

Kontrollera att dynan är hel och ren. Följ skötselanvisningarna extra noga. Saknas det spänst i hålfibern tyder det på att dynan är förbrukad och ska bytas ut.



Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas på stolar, bänkar, fåtöljer och andra sittmöbler. Men även i sängar.
2. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
3. Undvik att klämma dynan vid förvaring.
4. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
5. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
6. Undvik att utsätta dynan för regn/ dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
7. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Art.nr	Mått Sbr x Sd x H (cm)	Brukarvikt (kg)	Dynans vikt	INKO-hätta art.nr
B332	33x33x5cm	60	0,3	03-3535
B33435	35x35x7cm	90	0,4	03-3535
B33440	40x40x7cm	110	0,5	03-4040
B334	45x45x7cm	125	0,6	03-4545
B33450	50x50x7cm	140	0,7	03-5050

Hålfiberdyna med mjukare överdrag för privatmarknad

Uppfyller brandnorm EN1021-1

Art.nr	Mått Sbr x Sd x H (cm)	Brukarvikt (kg)	Dynans vikt	INKO-hätta art.nr
08-4545	45x45x7cm	125	0,6	03-4545